



ACE

**2 Alkoholtest-
Prüfröhrchen**

ZUM EINMALIGEN
GEBRAUCH

**2 Alcohol
test tubes**

FOR SINGLE USE

**2 Tubes
de test**

D'ALCOOLÉMIE À
USAGE UNIQUE

**2 Alcohol
reageerbuis**

VOOR EENMALIG
GEBRUIK



4260042952866

Interpretation des Messergebnisses / Meaning of crystal coloration:



Rote Verfärbung: Wenn sich die Kristalle im Mittelteil des Röhrchens rot verfärben, dann liegt der gemessene Alkoholgehalt über oder er ist gleich 0,25 mg/L Atemluft, was 0,5 Promille im Blut entspricht.

SIE SIND FAHRUNTÜCHTIG!

Red discoloration: If the crystals in the middle part of the tube turn red, the alcohol content in your breath is > or = to 0.25 mg / L of air, which corresponds to 0.5 per mill in the blood. **DO NOT DRIVE!**

Dieses Alkoholtest-Prüfröhrchen funktioniert wie ein chemischer Alkoholtester und liefert als Ergebnis den in der abgegebenen Atemprobe geschätzten Blutalkoholgehalt. Das beim Test ermittelte Messergebnis ist jedoch nur ein Richtwert und nicht rechtsverbindlich in Bezug auf die Feststellung der Tauglichkeit einer Person zum Lenken eines Fahrzeugs oder zur Ausführung einer Handlung, die unter Alkoholeinfluss zu einer Eigen- und Fremdgefährdung führt.

Inhalt:

2 Alkoholtest-Prüfröhrchen zum einmaligen Gebrauch mit je einem Ballon zur Testdurchführung (mit am Ballon aufgedruckter Testanleitung und Benutzungshinweisen).



Keine Rotverfärbung: Wenn sich die Kristalle im Mittelteil des Röhrchens nicht verfärben, dann liegt der gemessene Alkoholgehalt unter 0,5 Promille. Bitte beachten Sie unsere Hinweise im Text rechts oben.

No red discoloration: If the crystals in the middle part of the tube do not discolor, the alcohol content in your breath is < 0.5 per mill. Anyway please see our notes in the text bottom right.

This alcohol test tube works like a chemical alcohol tester. The result of this breath test shows the estimated quantity of alcohol in your blood. Nevertheless the test result of this breath test is only an approximate value and not legally binding with respect to the determination of your capability to steer a vehicle or doing any action which under the influence of alcohol endangers yourself and others.

Content:

2 Alcohol Test Tubes for single use with one balloon for each testing (each balloon with imprinted manual and instructions for use).

Hergestellt in der EU für | Made in the EU for | Fabrique dans l'EU pour | Gemaakt in de EU voor
ACE Handels- & Entwicklungs GmbH, Germany

	Überverpackung Einzelverpackung	Over packaging Single packaging
	Anleitungen	Manuals

Raccolta differenziata
Verifica le disposizioni
del tuo Comune



quefairedemesdechets.fr

ACE Handels- & Entwicklungs GmbH, Sägewerkstr. 9, 83395 Freilassing, Germany
Tel +49(0)8654 / 588 38-0, Fax +49(0)8654 / 588 38-98, info@ace-technik.com, www.ace-technik.com